

Guide de polissage SprintRay Ceramic Crown

Préparer la couronne après le traitement en réduisant les supports et en lissant la surface.

Il est recommandé d'utiliser une fraise en carbure à tronçonner.*



Fraise à tronçonner en carbure

1. Pré-polissage avec la molette spirale OptraGloss (8-10 000 tr/min).



Roue spirale OptraGloss

2. Polir avec la pâte à polir universelle Ivoclar à l'aide d'une brosse en poils de chèvre (8-10 000 tou




Brosse en poils de chèvre

3. Polissage final à l'aide d'un disque en coton propre à grande vitesse (30-40 000 tr/min).



Roue à polir en coton

Résultat : une surface lisse et brillante.

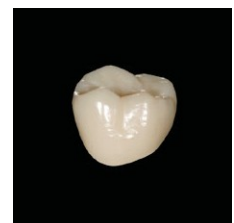

Sources des matériaux :

- Roue spirale OptraGloss (721094N) - Disponible auprès de votre distributeur Ivoclar.
- Pâte à polir universelle (573660) - Vendu directement par Ivoclar.
- Brosses de polissage et disques de polissage - Disponibles auprès d'une gamme de fournisseurs dentaires.